




Non-Pirogeno • Non-tossico • Monouso • Privo di metalli pesanti

scarica l'APP sul retro



XDRS

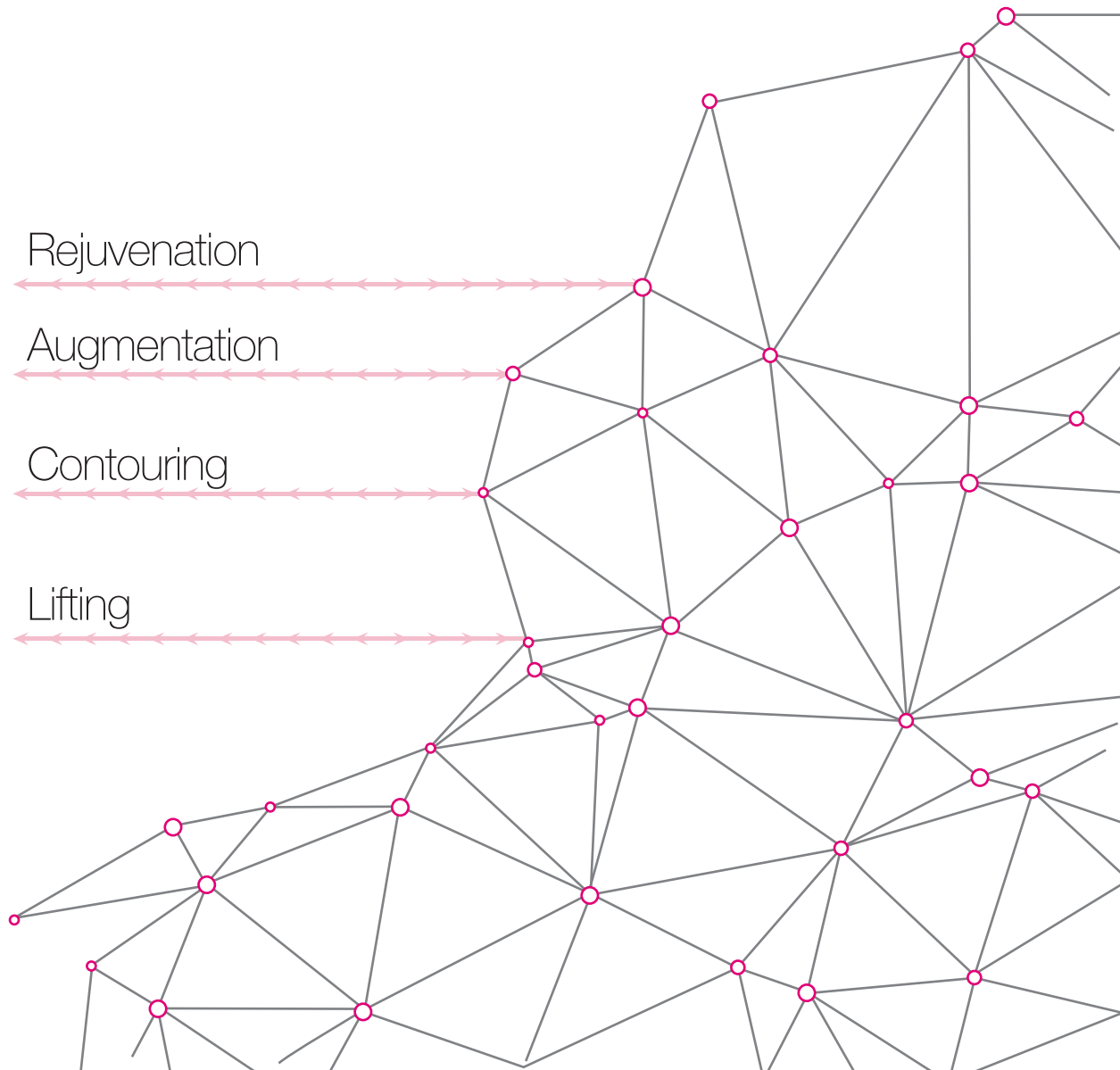

Rejuvenation

Augmentation

Contouring

Lifting

pag 3	Introduzione
pag 4	Studi sulla sicurezza
pag 5	Serie mono
pag 6	Serie Screw
pag 7	Tecniche d'inserimento
pag 8	Tecniche di ringiovanimento
pag 9	Filler Threads
pag 10	Serie Cog nasale
pag 11	360D Barbed Cog
pag 12	360D Barbed Cog
pag 13	360D Barbed Cog
pag 14	Molded Cog
pag 15	Tecniche di Lifting con cog
pag 16	Tecniche di Lifting con cog
pag 17	360D 2Needle
pag 18	Body Metod
pag 19	3 ^a generazione P(LA/CL)



Anni di prove e ricerche hanno introdotto nel mondo i nostri fili Xline, nuovi e totalmente diversi. 100% di polimeri puri di alta qualità, lo stesso materiale che produciamo per le suture di cardiocirurgia, il PDO è considerato il materiale per fili PIU' SICURO al mondo, totalmente degradabile in H₂O e CO₂.



Più di 1000 modelli di differenti tipi, lunghezze e diametri, per soddisfare ogni necessità per la tua bellezza, creati nello specifico per adattarsi a ogni singola indicazione.

Un'ampia gamma di fili per scegliere tutto ciò di cui hai bisogno dopo aver valutato il tuo paziente; **Lifting, Filling, Rejuvenation Contouring o Augmentation.**

L'unica linea Fili che ti offre la più elevata **resistenza alla trazione**, grazie all'elasticità del **PDO**, e migliori risultati di lunga durata con **P(LA/CL)**.

Siamo sempre all'avanguardia e saremo sempre i N° 1

Intervento:

Riteniamo che non sia necessario un intervento difficile per ottenere grandi risultati. La nostra missione è:

- 1 - Sviluppare nuovi fili con maggiori capacità di sollevamento.
- 2 - Inventare nuove tecniche per una procedura sicura, semplice, facile ed efficace.
- 3 - Offrire la migliore formazione e supporto a tutti i medici per diventare esperti di Lifting con fili.

STORIA SULLA SICUREZZA:

IL **PDO** (filo in **POLIDIOSSANONE**) è stato usato nelle procedure chirurgiche per molti anni. Se ne è fatto utilizzo nella chirurgia ortopedica, plastica, nelle suture chirurgiche e in ingegneria dei tessuti. Essere una parte della chirurgia della **CATARATTA** e della chirurgia **CARDIOVASCOLARE** dal 1980 è una chiara prova della sua sicurezza al 100% per il sollevamento del tessuto cutaneo e per la biostimolazione.*

REAZIONE DEL CORPO:

Il **PDO** non è traumatico, è duraturo, flessibile, idrofobico e non capillare.

Il **POLIDIOSSANONE** non ha proprietà antigeniche o pirogenetiche.

Nel processo dell'assorbimento sviluppa solo una lieve reazione tissutale con neocollagenesi.


DEGRADAZIONE DEL PDO NEL CORPO UMANO:

Il **PDO** si degrada tramite la idrolisi, e i prodotti finali sono principalmente eliminati nelle urine come C e H₂O. La restante parte viene eliminata tramite la digestione o espirata come CO₂.**

Il biomateriale viene completamente riassorbito in 6/18 mesi a seconda del modello del filo, sul tessuto si può vedere solo una minima reazione da corpo estraneo tramite miofibroblasto nel punto del filo.

IMMAGINE ISTOLOGICA DELL'EPIDERMIDE E DEL DERMA DOPO INSERIMENTO


Studio immuno-istochimico del Collagene III

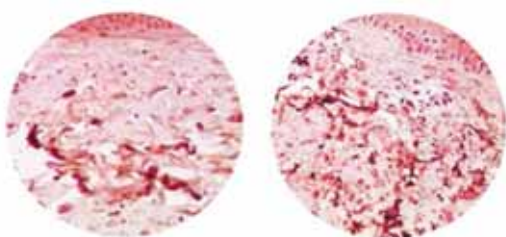

Prima

Dopo 6 mesi


Indice di attività proliferativa delle cellule epiteliali

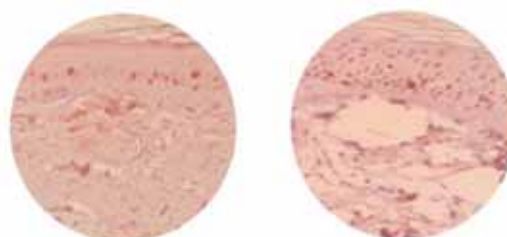

Prima 13%

Dopo 60 giorni 25%


Miglioramento della membrana di basamento epiteliale, collagene di tipo IV nel recupero della membrana basale e dei vasi circostanti.

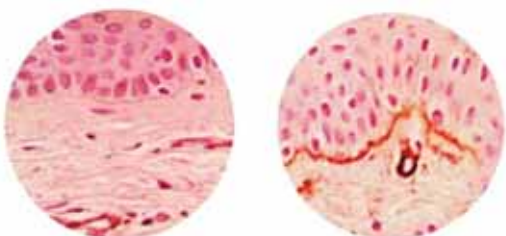

Prima

Dopo

Aspetto di crescita epidermica, strati di ispessimento dell'epidermide, miglioramento della vascolarizzazione.

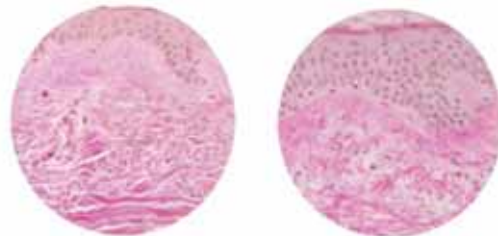

Prima

Dopo

* Boland, Eugene D.; Coleman Branch D.; Barnes Catherine P.; Simpson David G.; Wnek Gary E.; Bowlin Gary L. (January 2005). "Electrospinning polydioxanone for biomedical applications". Acta Biomaterialia. Elsevier. 1 (1): 115-123.

** Tiberiu Niță (Mar 2011). "Concepts in biological analysis of resorbable materials in oro-maxillofacial surgery". Rev. chir. oro-maxilo-fac. implantol. (in rumeno). 2 (1): 33-38. ISSN 2069-3850


Mono

È molto efficace nel rassodamento cutaneo e nella rimozione delle rughe attraverso **l'auto stimolazione delle cellule**.

Non vi è interruzione della vita quotidiana anche subito dopo l'intervento.

Inoltre, non vi sono effetti collaterali o timori dopo l'intervento di rimozione poiché esso sarà **totalmente dissolto nel corpo dopo 6 mesi**.

La nostra SERIE MONO PDO di fili di dimensioni variabili. Esso è progettato per **polidossanone puro monofilamento** che accelera una **maggiore stimolazione** nello strato del derma e termina formando **più collagene**.

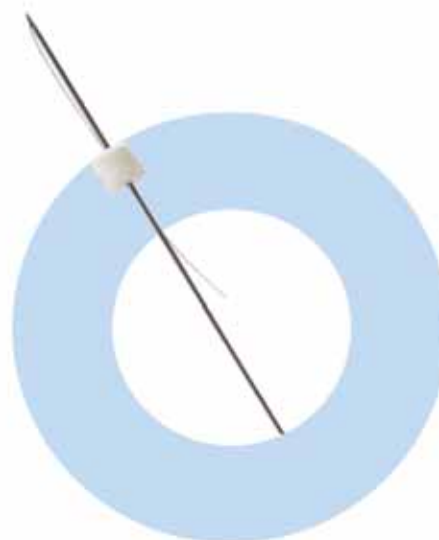

Needle Gauge Spessore Ago	Needle Length Lunghezza Ago	Thread Length Lunghezza Filo	Thread Usp Usp Filo
30 G	25/38	30/50	7-0
29 G	25/38/50/60	30/50/70/90	6-0
27 G	38/50/60	50/70/90	5-0
26 G	38/50/60/90	50/70/90/150	5-0

PRINCIPALI MODELLI

MONO (PDO) 30G25



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **30mm / 6-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **30G / 25 mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Occhiaie, peri-orbitale, zampe di gallina, glabella, giunture delle dita, cicatrici.

MONO (PDO) 29G38



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **60mm / 6-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **29G / 38 mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Occhiaie, peri-orbitale, zampe di gallina, glabella, nasolabiale, rughe sulla fronte, rughe marionetta, giunture delle dita, cicatrici.

MONO (PDO) 26G50



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **80mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 50mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Rughe sulla fronte, nasolabiale, marionetta, rughe sul collo, leggero doppio mento, profilo del mento.

MONO (PDO) 26G60



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **100mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 60mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Rughe sul collo, leggero doppio mento, marionetta, profilo del mento, rughe del corpo, smagliature.


Spirale, tomado, vite, tutti nomi differenti per uno stesso concetto! lo Screw.

Esso ha un'azione più aggrappante.

Screw



A differenza di morbidi fili dritti, lo Screw è raddoppiato e avvitato ruotando intorno al micro ago, offrendo un'azione più rassodante tramite restringimento del tessuto.

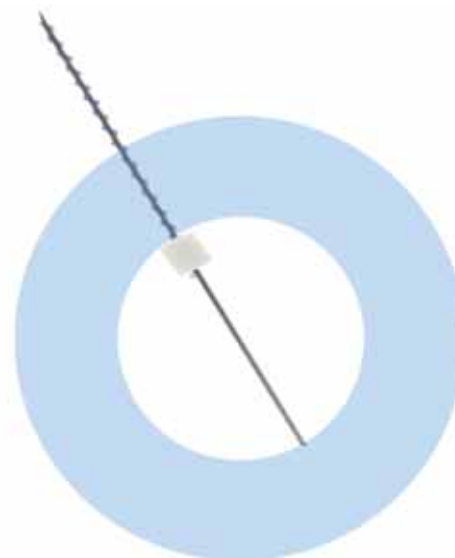

Needle Gauge Spessore Ago	Needle Length Lunghezza Ago	Thread Length Lunghezza Filo	Thread Usp Usp Filo
30 G	25/38	30/50	7-0
29 G	25/38/50/60	30/50/70/90	6-0
27 G	38/50/60	50/70/90	5-0
26 G	38/50/60/90	50/70/90/150	5-0

PRINCIPALI MODELLI



SCREW (PDO) 29G38

Tipo sutura: **Twisted mono PDO**

Misura sutura: **60mm / 6-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **29G / 38mm**

Confezione: **10pz. (10x1 buste)**

Rughe sulla fronte, nasolabiali, rughe da marionetta, cicatrici, zampe di gallina



SCREW (PDO) 26G50

Tipo sutura: **Twisted mono PDO**

Misura sutura: **80mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 50mm**

Confezione: **10pz. (10x1 buste)**

Nasolabiali, rughe da marionetta, rughe sulla fronte, rughe sul collo, leggero doppio mento, profilo del mento, cicatrici.



SCREW (PDO) 26G60

Tipo sutura: **Twisted mono PDO**

Misura sutura: **100mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 60mm**

Confezione: **10pz. (10x1 buste)**

Nasolabiali, rughe da marionetta, rughe sul collo, Leggero doppio mento, profilo del mento. Smagliature, cicatrici, ringiovanimento corpo.



SCREW (PDO) 26G90

Tipo sutura: **Twisted mono PDO**

Misura sutura: **150mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 90mm**


Confezione: **10pz. (10x1 buste)**

Ringiovanimento corpo, smagliature.

TECNICHE DI INSERIMENTO FILI PER IL RINGIOVANIMENTO:


TECNICA A VENTAGLIO:

I fili di **PDO Mono** o **Screw** vanno inseriti per via intradermica e ipodermica, parallelamente alla superficie della pelle, partendo da un punto in direzioni diverse "a ventaglio". O da diversi punti di inserimento verso un unico punto finale.

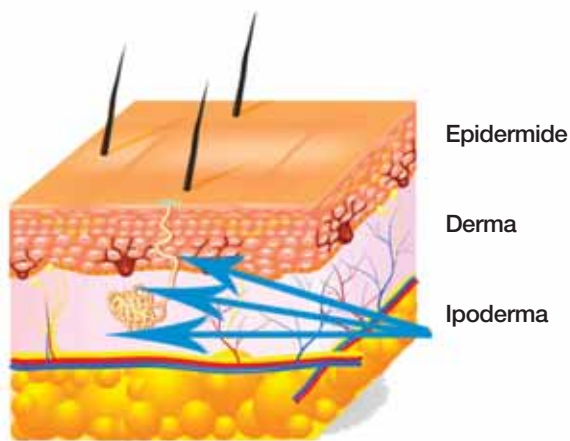


TECNICA SANDWICH:

I fili di **PDO Mono** o **Screw** vanno inseriti per via intradermica e ipodermica parallelamente alla superficie della pelle da un punto nella stessa direzione, in diversi strati della pelle, uno sotto l'altro.

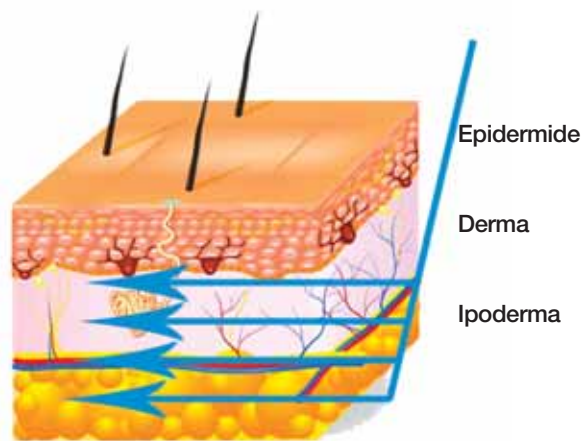


TECNICA DI CUCITURA:

I fili di **PDO Mono** o **Screw** vanno inseriti per via intradermica e ipodermica a livelli differenti della pelle a "zig zag", in basso e in alto prendendo tutti gli strati di pelle, migliorando il rassodamento e l'azione di restringimento del rilassamento cutaneo.

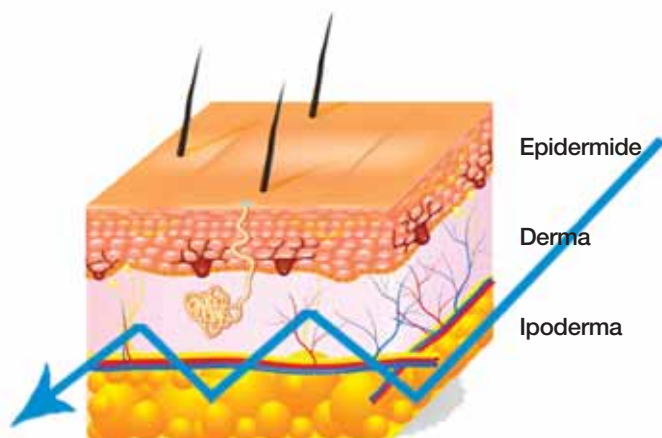

TECNICA A MAGLIA:

I fili di **PDO Mono** o **Screw** vanno inseriti da diversi punti in direzioni verticali e orizzontali, che hanno come risultato una maggiore forza e supporto nella zona.

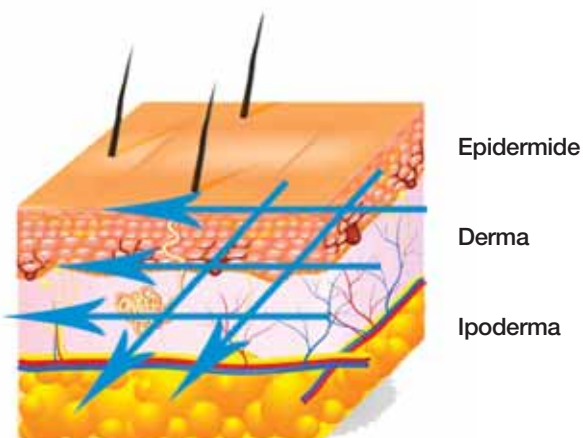



MONO (PDO) 30G25



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **30mm / 6-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **30G / 25 mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Occhiaie, Zampe di gallina, Glabella, Cicatrici



MONO (PDO) 29G38



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **60mm / 6-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **29G / 38 mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Fronte, Nasolabiale, Occhiaie, Zampe di gallina, Cicatrici



MONO (PDO) 26G50



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **80mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**

Misura ago: **26G / 50mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Nasolabiale, Marionetta, Fronte, Profilo del mento, Cicatrici



MONO (PDO) 26G60



Tipo sutura: **Monofilamento PDO**

Misura sutura: **100mm / 5-0 USP**

Tipo ago: **Sharp Needle**


Misura ago: **26G / 60mm**

Confezione: **10 pz. (10x1 blister)**

Doppio mento, Rughe su collo, Marionetta, Smagliature



Rughe sulla fronte
 Glabella
 Rughe nasolabiali
 Rughe sul collo
 Cicatrici

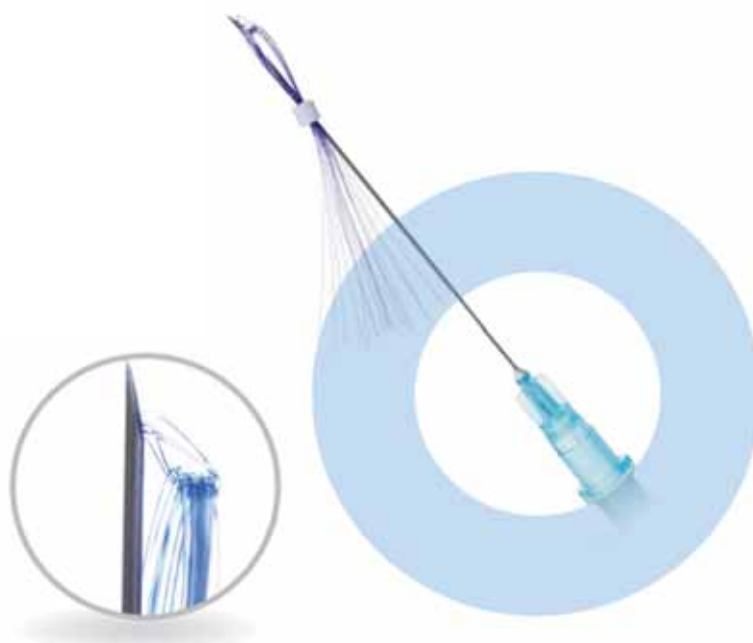

- 14 Fili in unica cannula
- Trattamento più breve
- Riduzione del dolore
- Massimizzazione del risultato e dell'effetto

Tipi

- Sharp Needle
- L Blunt Cannula

Needle Gauge Spessore Ago	Needle Length Lunghezza Ago	Thread Length Lunghezza Filo	Thread USP Usq Filo
23 G	38/60	50/90	5-0 x 14

PRINCIPALI MODELLI



MULTI-FILL (PDO) 23G38

Tipo sutura: **Multi-mono PDO**
 Misura sutura: **25mm (2*7) / 5-0 USP**
 Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
 Misura ago: **23G / 38mm**
 Confezione: **10pz. (2x5 blister)**

Glabella Rughe profonde, rughe profonde sulla fronte, brevi rughe nasolabiali, cicatrici.



MULTI-FILL (PDO) 23G60

Tipo sutura: **Multi-mono PDO**
 Misura sutura: **45mm (2*7) / 5-0 USP**
 Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
 Misura ago: **23G / 60mm**
 Confezione: **10pz. (2x5 blister)**

Rughe profonde sulla fronte, rughe sul collo, Nasolabiali, Rughe sul corpo e smagliature.

Filler Thread:

- È sicuro, semplice, facile ed efficace per rassodare il tessuto cutaneo e rimuovere rughe profonde.
- Ridefinisce il contorno del viso, stimolando la produzione di collagene.
- Il filo è parte di una struttura di supporto integrata per il tessuto del viso dovuta alla sintesi del collagene.
- L'effetto rassodante raggiunge il suo apice 3 mesi dopo che il collagene si è formato intorno ai fili.
- L'effetto rassodante dura dai 6 ai 9 mesi.

Un filo speciale innovativo per soddisfare i pazienti con lievi deformità nasali. Ora possiamo ridefinire il ponte nasale efficacemente in modo più sicuro rispetto ai filler riempitivi. Possiamo anche sollevare la punta del naso in modo semplice e sicuro.



Fili nose di altro marchio

CANNULA:
19G 50mm BC

FILO:
Lunghezza 25mm*2

1 / 2 USP



Fili nose X-line

CANNULA:
19G 50mm LBC

FILO:
Lunghezza 40mm*2

0 USP



Blunt Cannula per maggiore sicurezza

Filo più spesso e più solido per una definizione chiara anteriore



Stesso punto di inserimento per ponte nasale e setto nasale

Dopo molti casi di gravi complicazioni dovute all'iniezione di riempimento nasale, che avrebbero potuto provocare cecità e decesso, i Fili non-chirurgici sono divenuti la **PRIMA SCELTA** per le deformità nasali di minima entità. Intervento sicuro, semplice, facile ed efficace, con risultati molto soddisfacenti e **ZERO RISCHI** di qualsiasi tipo.

Nose COG 19G38, da impiantare medialmente nel setto in profondità fino al labbro superiore, innalzerà in modo evidente la punta nasale.
2-4 Fili / Trattamento



Nose COG 19G50, da impiantare in profondità sull'osso del ponte nasale nella linea centrale, dando una chiara definizione.
2-6 Fili / Trattamento



FG Nose (PDO) FG 19G38

Tipo sutura: **FG Naso COG**

Misura sutura: **50mm (2) / 0-0 USP**

Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**

Misura ago: **19G / 38mm**

Confezione: **10pz. (2x5 blister)**

Innalzamento punta nasale



FG Nose (PDO) FG 19G50

Tipo sutura: **FG Naso COG**

Misura sutura: **70mm (2) / 0-0 USP**

Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**

Misura ago: **19G / 50mm**

Confezione: **10pz. (2x5 blister)**



Definizione punta nasale

360°D BARBED COG (CANNULA FE)

360°D Barbed COG è un filo spinato che presenta dentini e spine in superficie. Poiché aumenta il punto di contatto con il tessuto, il lifting è massimizzato.

Abbiamo sviluppato il 360°D Barbed COG che a differenza di altri COG ha più spine bidirezionali su tutti i lati per dare maggiore contatto e un tocco più forte al tessuto, producendo come risultato un lifting più forte.


DIVERSE GENERAZIONI DI COG

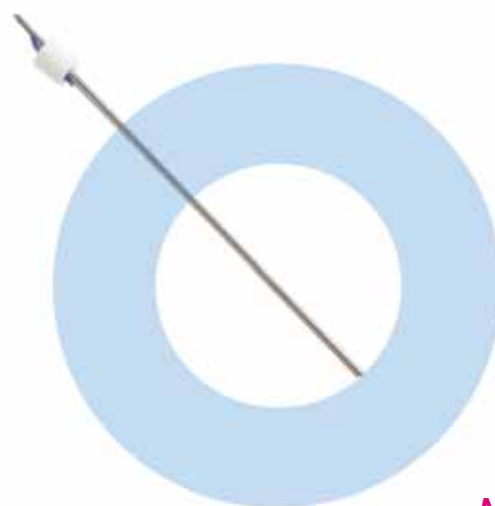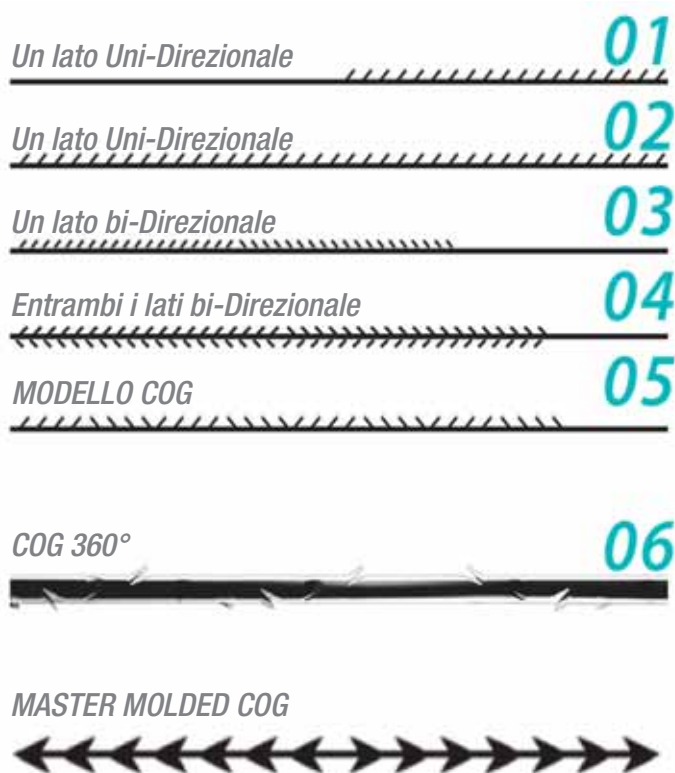

NUOVO

XLine6THG / 360° D COG

Sviluppando il nostro 360° Infinity COG molto efficace per risultati più chiari e un fissaggio più forte del tessuto sollevato.

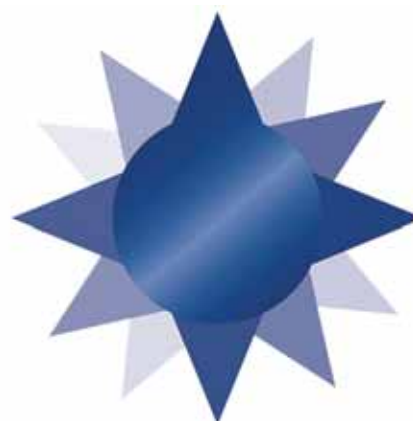

NUOVO

Sezione trasversale del 360°D Infinity Cog

CONFRONTO DELLA SEZIONE LONGITUDINALE:

Fili X-Line

Altri fili di bassa qualità

**Xline sagomati
Master Molded COG**

**Xline 360°D
BARBED COG**

**Altri 360°D
COG**

**Altro marchio
COG 6D**



Sezione trasversale di
XLine 360°D COG




Sezione trasversale di
Altri brand COG



Xline
360°D Infinity COG

- Le spine sono:
- Più grandi
 - Più forti
 - Più ampie

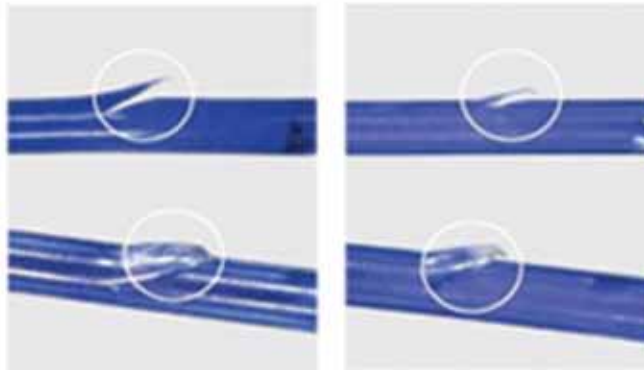


Altri marchi
6D Barbed COG

- Le spine sono:
- Più piccole
 - deboli
 - strette

Grazie alle nostre ricerche abbiamo raggiunto una progettazione perfetta, non basata sul numero di spine, ma mirata a raggiungere:

- il numero massimo di spine.
- a mantenere la massima forza di trazione.
- Il massimo risultato di sollevamento e durata.

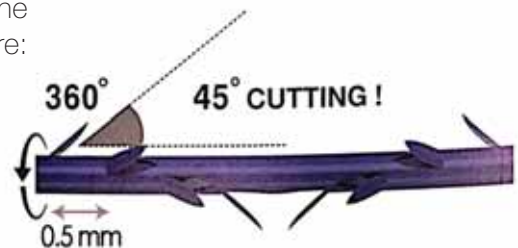

Perchè i nostri fili sono più forti e più duraturi?

Non tutti i **Barbed COG** sono uguali;

- Noi riusciamo ad ottenere i **Barbed COG** con polifilamenti, comprimendo e collegando pochi monofilamenti.
- Minore è il numero di monofilamenti, più forte è il collegamento tra essi, maggiore è la forza e maggiore è la durata che otteniamo.

Barbed COG estratti dopo 60 giorni



XLine 360°D Cog

COG altro marchio


360°D BARBED COG (CANNULA FE)




L-SHAPE BLUNT CANNULA

Lo **Sharp Needle**, essendo appuntito, poteva causare facilmente danni al tessuto cutaneo interno e ai vasi sanguigni, causando lividi e gonfiore. Il vecchio tipo di cannula smussata era sicura ma difficile da usare per penetrare il tessuto. La nostra Cannula a L in acciaio medico flessibile di alta qualità:

- Più penetrazione
- Minore resistenza
- Sicura e con meno danni al tessuto

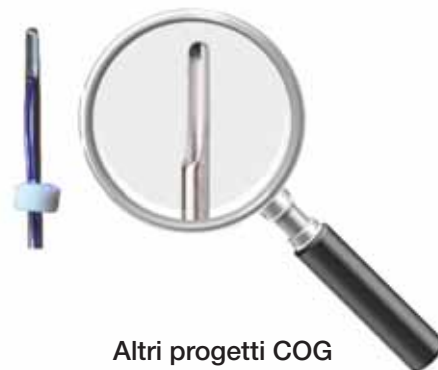


Altri progetti COG

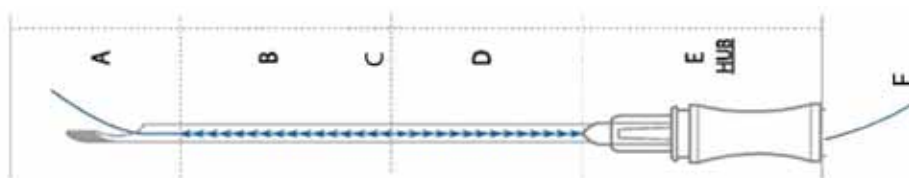

altri COG

CURIAMO OGNI MINIMO DETTAGLIO

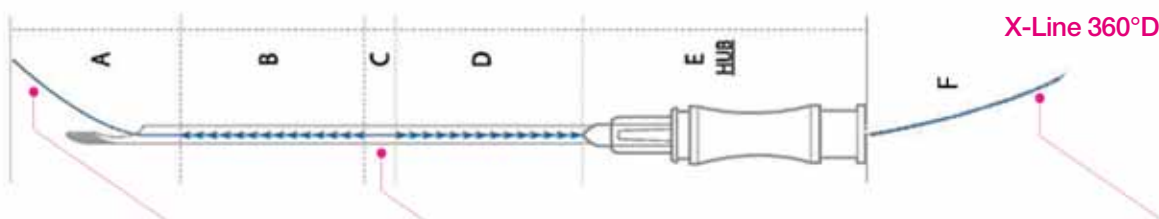

X-Line 360°D COG

FISSAGGIO
PIÙ FORTE

MINORE
CORRUGAZIONE


PIU' CONTROLLO

COG Lift (PDO) 360D 19G100

Tipo sutura: **360D Barbed COG**
Misura sutura: **160 e 180mm / 0-0 USP**
Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
Misura ago: **19G / 100mm**
Confezione: **10pz. (2x5 blister)**
Sollevamento viso, collo, seno e corpo

COG Lift (PDO) 360D 21G90

Tipo sutura: **360D Barbed COG**
Misura sutura: **150mm / 2-0 USP**
Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
Misura ago: **21G / 90mm**
Confezione: **10pz. (2x5 blister)**
Per pelle sottile: Viso e collo

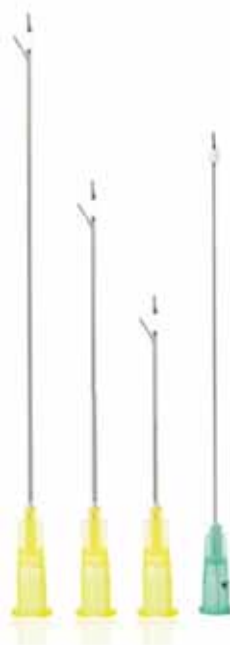

COG Lift (PDO) 360D 19G80


Tipo sutura: **360D Barbed COG**
Misura sutura: **140 e 150mm / 0-0 USP**
Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
Misura ago: **19G / 80mm**
Confezione: **10pz. (2x5 blister)**
Per sollevamento di piccole dimensioni, a breve distanza. Viso e collo

COG Lift (PDO) 360D 19G60

Tipo sutura: **360D Barbed COG**
Misura sutura: **100mm / 1-0 USP**
Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**
Misura ago: **19G / 60mm**
Confezione: **10pz. (2x5 blister)**
Sollevamento sopracciglia e cicatrici da acne

È un **COG** speciale con coni simili a frecce invece di spine, più ampio e più forte. Inserito saldamente nel tessuto sollevato, massimizza l'effetto, e aumenta la stabilità per 18/24 mesi.

Per ottenere risultati migliori, abbiamo progettato un **MOLDED COG** migliore.

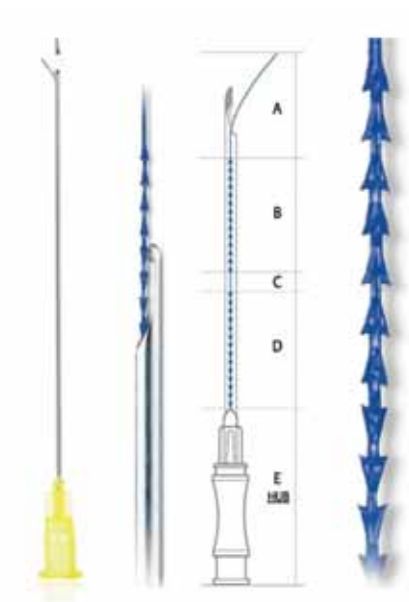

Mold COG (PDO) Mold 18G100

Tipo sutura: **Molded Barbed COG**

Misura sutura: **185mm / 0-0 USP**

Tipo ago: **Lc Blunt Cannula**

Misura ago: **18G / 100mm**

Confezione: **10pz. (2x5 blister)**

MOLDED COG bidirezionale



MOLDED COG sbalzato



SZ MOLDED COG rinforzato

La caratteristica dei MOLDED COG sono i 2 punti di contatto in ogni spina.

Con l'invenzione del nostro nuovo MOLDED COG SZ otteniamo 4 punti di contatto invece di 2, offrendo un fissaggio più forte e migliori risultati.



ALWAYS THE LATEST





COG SOLLEVAMENTO SOPRACCIGLIO:

Filo: 360°D Barbed COG

dimensione: 19G60

Numero: 2-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perchè abbiamo necessità di sollevare la pelle stessa. Non è presente quasi nessuno strato di grasso sulla fronte.

Anestesia: Iniezione locale dell'intero tracciato
Lidocaina con l'Epinefrina

Tecnica: da diversi punti di inserimento in basso verso le sopracciglia e verso l'alto in un punto finale nel cuoio capelluto.



COG SOLLEVAMENTO NASOLABIALE:

(Unico metodo di inserimento)

Filo: 360°D Barbed COG

dimensione: 19G80 / 21G90 / 19G100

Numero: 3-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l'area adiposa lateralmente e verso l'alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto
Lidocaina con l'Epinefrina

Tecnica: da un unico punto di inserimento sulla linea dei capelli, sul lato opposto al bordo della palpebra oculare, verso l'area adiposa cadente.



COG SOLLEVAMENTO PROFILO DEL MENTO:

(Unico metodo di inserimento)

Filo: 360°D Barbed COG

dimensione: 19G80 / 19G100 / 21G90

Numero: 3-4 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l'area adiposa lateralmente e verso l'alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto
Lidocaina con l'Epinefrina

Tecnica: da un unico punto di inserimento sulla linea dei capelli, sul lato opposto al bordo della palpebra oculare, verso l'area adiposa cadente.

Sia il sollevamento nasolabiale che il sollevamento del profilo del mento includono il sollevamento delle rughe da marionetta. Per sollevare tutte le rughe nasolabiali da marionetta e del profilo del mento, dovremmo combinare 5-6 fili su ogni lato.



SOLLEVAMENTO VISO COG: (Metodo BASSO ALTO)

Filo: 360°D Barbed COG

Dimensione: 19G100 / 21G90 / 19G80

Numero: 3-6 fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo perché abbiamo necessità di sollevare l'area adiposa lateralmente e verso l'alto.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Tecnica: Da diversi punti di inserimento verso il basso e in alto fin quando è possibile nel cuoio capelluto.

È possibile utilizzare 3 fili solo se necessario solo per sollevare la parte nasolabiale o il profilo del mento separatamente.



COG DEFINIZIONE PROFILO DEL MENTO:

Filo: 360°D Barbed COG


Dimensione: 19G100

Numero: 3-4 Fili / ogni lato

Strato: Sottocutaneo.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Tecnica: da un punto di inserimento lateralmente all'angolo, uno sull'osso mandibolare, uno sopra e uno sotto.

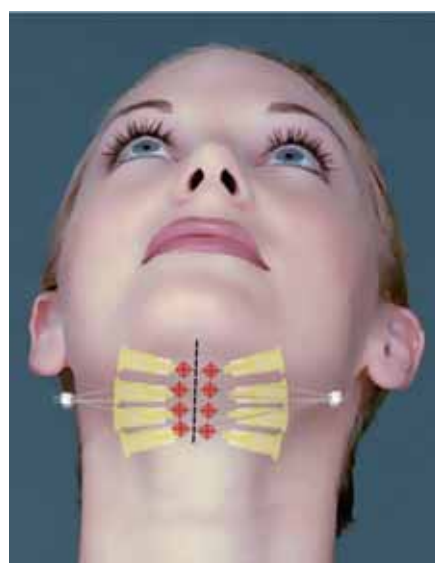

SOLLEVAMENTO DOPPIO MENTO:

Filo: 360°D Barbed COG

Dimensione: 19G80 / 19G100 / 21G90

Numero: 4-6 Fili / ogni lato


Strato: Sottocutaneo o derma profondo perchè abbiamo la necessità di sollevare la pelle cadente e non l'adipe.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina

Tecnica: Da diversi punti di inserimento insieme alla tecnica a croce linea centrale.

360°D 2 NEEDLE (Dual NEEDLE)

Il filo **360°D PDO 2 NEEDLE** rinforzato con aghi doppi smussati bidirezionali, sviluppati specificatamente per assisterti nel trattamento di indicazioni che il sollevamento con **COG** non soddisferà. Offre un sollevamento più forte per corpo, sopracciglia, doppio mento e maggiore definizione del bordo mandibolare. Risultati immediati, a lungo termine, sollevamento forte senza incisione.

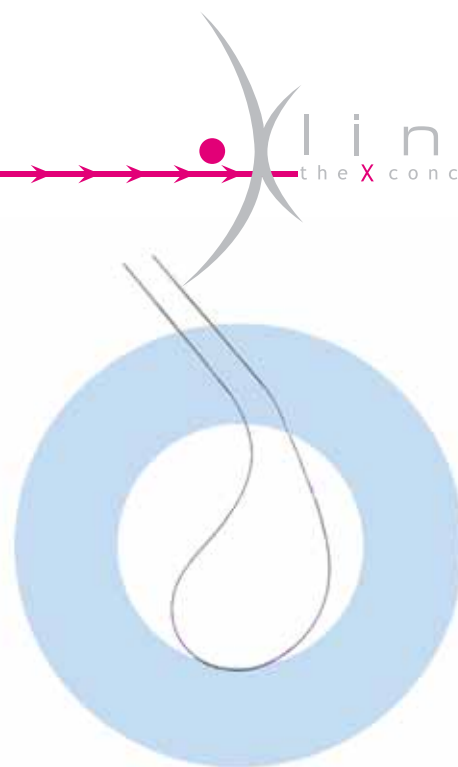

2Needle (PDO) 300

Tipo sutura: **360D Barbed COG**

Misura sutura: **300mm / 0-0 USP**

Tipo ago: **2 Blunt Needles**

Misura ago: **21G / 125mm**

Confezione: **1pz. (1x1 blister)**

Sollevamento sopracciglia, viso, collo e definizione profilo del mento

2 Aghi (PDO) 500

Tipo sutura: **360D Barbed COG**

Misura sutura: **500mm / 0-0 USP**


Tipo ago: **2 Blunt Needles**

Misura ago: **21G / 125mm**

Confezione: **1pz. (1x1 blister)**

Doppio mento, sollevamento seno, glutei e diverse parti del corpo.

Sollevamento collo

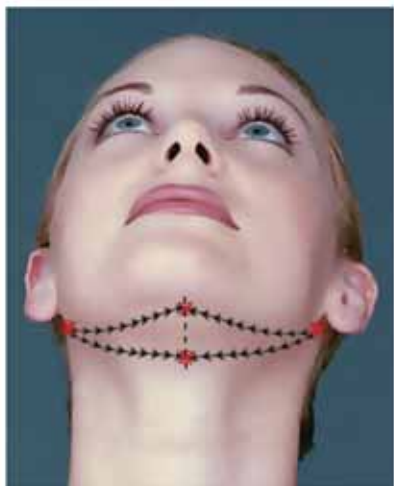

Un punto di inserimento sotto il lobo dell'orecchio in direzione del centro del collo, uno parallelo al bordo della mandibola e uno al centro del doppio mento.

Definizione profilo del mento



Tecnica Forma a U, da 2 punti lateralmente verso l'angolo della mandibola, e parallelamente al profilo del mento. Uno sopra e uno sotto.

Sollevamento sopracciglio



Attraverso un punto di inserimento in alto nella palpebra per poi uscire da sotto il sopracciglio nei punti da sollevare.



LIFT VISO - 360°D 2NEEDLE

Filo: 360°D 2 NEEDLE

Dimensione: 300mm - 500mm

Numero: 1 - 4 Fili / per lato

Strato: Ipodermale

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con Epinefrina.

Tecnica: Tecnica forma a V da 1 punto di inserimento in alto nella palpebra per uscire da 2 punti in basso nell'adipe del viso cadente.

LIFT GLUTEI/LIFT SENO - 360°D BARBED COG

Filo: 360D Barbed COG



Dimensione: 19G100

Numero: 10 Fili / per lato

Strato: SubQ.

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con epinefrina.

Tecnica: 2 gruppi da 2 punti di inserimento un sollevamento verso l'alto e un sollevamento in obliquo, incrociando insieme una rete di supporto di modellamento.

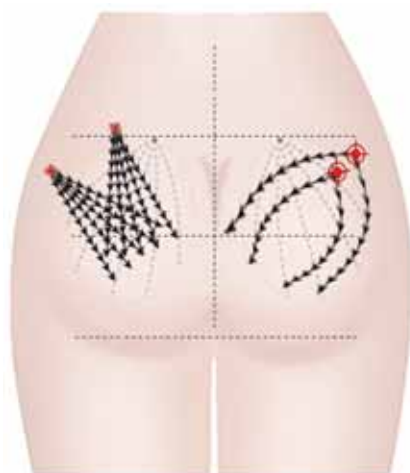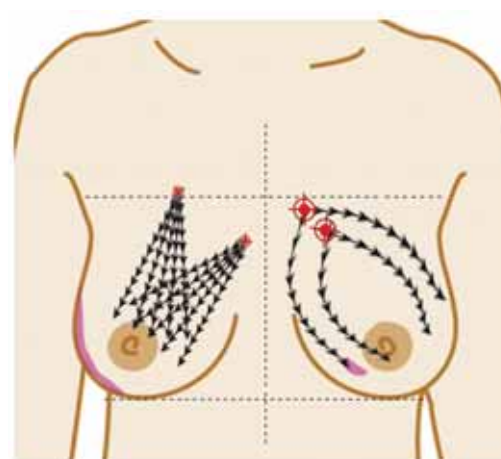

LIFT GLUTEI /LIFT SENO - 360°D 2Needle

Filo: 360°D 2Needle

Dimensione: 500mm

Numero: 3-5 Fili / per lato

Strato: SubQ..

Anestesia: Iniezione locale punto per punto Lidocaina con Epinefrina.

Tecnica: Tecnica della forma a V da 1 punto di inserimento in alto per uscire da 2 punti in baso dall'adipe cadente.

DOPO IL TRATTAMENTO:

Si consiglia l'utilizzo di sostegni per 2 mesi.



3^a Generazione P (LA/CL)




I nuovi fili **Poly-L-Caprolactone di 3^a generazione**, rivestiti di acido ialuronico. Sviluppate tecnicamente con più spine, 360°D, filo più forte.



Altri fili P(LA/CL)

- P(LA/CL) a lunga durata
- 0-2 USP / diverse lunghezze
- Barbed COG a lato unico
- Multidirezionale
- Blunt Cannula

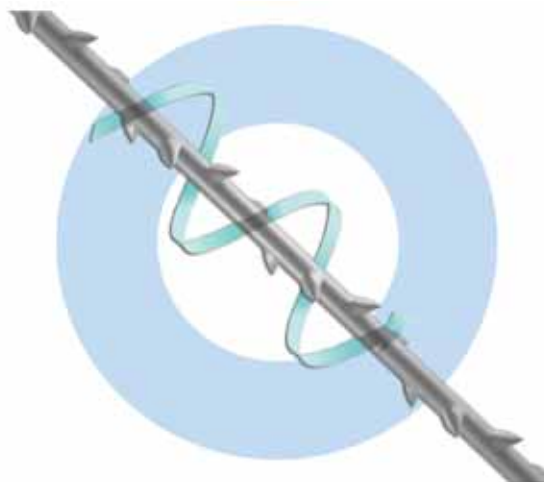

X-Line file e P(LA/CL)

- P (LA/CL) Più lunga durata
- 0-1 USP / diverse lunghezze
- 3rd 360°D Barbed COG
- Bidirezionale
- L-Shape Blunt Cannula

P(LA/CL) MODELLI PRINCIPALI

Progettato dal Dott. Ghofran

	Needle Gauge SPESSORE AGO	Needle Length LUNGHEZZA AGO	Thread Length LUNGHEZZA FILO	Thread Usp FILO USP
MONO PLX	29 G	38 / 50	50 mm / 80 mm	5 - 0
SPRING PLX	29 G	38 / 50	60 mm / 90 mm	5 - 0
FG NOSE PLX	19 G	38 / 50	50 mm / 80 mm	0 - 0
COG 360D PLX 10	19 G	60 LBC	100 mm	0 - 0
COG 360D PLX 20	19 G	100 LBC	200 mm	0 - 0
360D 2Needles 30	21 G	125 Blunt	300 mm	0 - 0
360D 2Needles 50	21 G	125 Blunt	500 mm	0 - 0

Quando usare i PDO?

Quando hai bisogno di risultati di sollevamento più forti.
Quando hai bisogno di un budget di costo accettabile.
Quando hai bisogno di testare risultati a più breve termine
usa polydioxanone

Quando usare i P(LA/CL)?

Quando hai bisogno di risultati a lunga durata.
Quando hai bisogno di aumentare la durata
dei risultati PDO
usa Poly-L-Caprolactone

Solo con **X-Line** possiamo combinare **PDO** e **P(LA/CL)**

Per ottenere entrambi i benefici nello stesso intervento.

FORTE SOLLEVAMENTO - LUNGA DURATA



Xcelens International Sagl

Via Soldini 22_ 6830 Chiasso_ **Switzerland**
info@xcelens.ch  www.xcelens.ch



Researches & Development By:
Future Experts Ltd., - **Egypt**
www.xpertsmed.com
Training at; www.xdrs.live



GERMAN CE Certified

KTR Europe GmbH - Germany
Mergenthalerallee 77, Eschborn, Hessen, 65760, Germany



Partner d'eccellenza

Distributore unico e autorizzato per l'Italia
www.mtcorp.it



XDRS

